



ИНСТРУКЦИЯ

по применению материала **ГИДРОКСИАПОЛ ГАП 99г**
для замещения малых костных дефектов

Описание. Гранулы **ГАП-99г** круглой или неправильной формы белого или почти белого цвета. Состав: гидроксипатит – 50% + трикальцийфосфат – 50%. Материал выпускается в виде гранул размером **0,25-2** мм. Гранулы - пористые керамические фрагменты.

Фармакологические свойства. Является основой неорганического матрикса твердых тканей. Характеризуется лучшей биосовместимостью с тканями человека и не вызывает реакции отторжения. Стимулирует остеогенез, способствует адсорбированию на своей поверхности собственных морфогенетических белков человека после заполнения костных полостей резорбируется, замещаясь костной тканью.

Показания к применению. Рекомендуется: для заполнения малых костных полостей различной этиологии после хирургического вмешательства по поводу: цистэктомии, резекции, удаления зубов для предотвращения атрофии альвеолярного отростка и пр.

Методика применения. Материал ГАП 99г в виде гранул увлажняют кровью пациента, лучше смесью кровь-костный мозг, (стерильным физиологическим раствором) и хирургическим инструментом вносят в костный дефект, заполняя его на 80-90%. Вызвать свежее кровотечение можно с помощью бора при прохождении кортикальной части кости. Дефект закрывают мягкими тканями, накладывая швы, которые, по возможности, не должны располагаться в непосредственной близости с ГАП. Антибиотики, иммуномодуляторы и пр. лекарственные препараты могут применяться вместе с ГИДРОКСИАПОЛОМ путем его пропитывания до имплантации.

Стерилизация не стерильного материала должна производиться перед применением и может производиться неограниченное число раз в сухожаровом шкафу при температуре t° 180°С не менее 20 мин.

Противопоказания: гнойные воспалительные процессы в области заполняемого дефекта.

Условия хранения: хранить при температуре от -30°С до +30°С

Упаковка: 1г (стерильно), 5г, 50г – не стерильно.

Условия хранения: хранить при температуре от -30°С до +30°С.

Срок годности: 3 года

Не является лекарственным средством.

Изготовитель: ООО «НПК «ПОЛИСТОМ»
105094, г.Москва, Семеновская наб., д.2/1, стр.1
+7 499 922 35 36, office@polystom.ru