



ИНСТРУКЦИЯ

по применению материала **ИНДОСТ-гель** + в стоматологии

Описание. Паста белого или слегка желтоватого цвета, упакованная в шприцы одноразовые, емкостью 0.8 мл. Может содержать линкомицин (буква Л).

Свойства. Является композицией нанодисперсных ортофосфатов кальция с мелкими гранулами и факторами роста. Характеризуется биосовместимостью с тканями человека и не вызывает реакции отторжения. Отличается повышенными остеоиндуцирующими свойствами. Относится к нетоксичным веществам и не вызывает отдаленных нежелательных последствий.

Показания к применению. Используется при возмещении небольших костных дефектов различного генеза в челюстно-лицевой области посредством их заполнения. Возможно сочетанное использование с различными остеопластическими материалами.

Методика применения. ХИРУРГИЯ в пародонтологии: слизисто-надкостный лоскут и поверхность корня разобщают, после тщательного кюретажа и деэпителизации лоскута костный карман заполняют гелем. После имплантации материала слизистую ушивают, в каждом межзубном промежутке на 7-8 дней. Следует следить за тем, чтобы швы не были напряжены избытком имплантационного материала. Больному назначают антигистаминные препараты, при необходимости - анальгетики и антибиотики.

При заполнении различных костных полостей после цистэктомии, секвестрэктомии и др. материалом заполняется костная полость, после чего костный дефект закрывается лоскутом. Допускается использование материала **ИНДОСТ-гель** + с другими материалами: ГАП 99г, КОЛАПОЛ КП-2, мембраной ПАРОДОНКОЛ и др. Швы стараться располагать выше или ниже полости.

Материал выпускается в стерильной упаковке. Повторно не стерилизовать.

Хранение. Хранить при температуре до 25°C.

Противопоказания. Активный воспалительный процесс (во время операции).

Срок годности: 3 года

Не является лекарственным средством.

Изготовитель: ООО «НПК «ПОЛИСТОМ»
105094, г.Москва, Семеновская наб., д.2/1, стр.1
+7 499 922 35 36, office@polystom.ru