



## **ИНСТРУКЦИЯ**

по применению материала ИНДОСТ-гель в стоматологии

**Описание.** Паста белого или слегка желтоватого цвета, упакованная в шприцы одноразовые, емкостью 0.1, 0.2, 0.5 или 1 мл. Может содержать линкомицина гидрохлорид (буква Л на этикетке).

**Свойства.** Является композицией ГИДРОКСИАПОЛА (гидроксиапатита, трикальцийфосфата) с органическими составляющими. Характеризуется биосовместимостью с тканями человека и не вызывает реакции отторжения. Содержит композицию факторов роста. Отличается повышенными остеоиндуцирующими свойствами. Относится к нетоксичным веществам и не вызывает отдаленных нежелательных последствий.

**Показания к применению.** Используется при возмещении небольших костных дефектов различного генеза в челюстно-лицевой области посредством их заполнения, при сочетанном использовании различных остеопластических материалов, а также при хирургическом и терапевтическом лечении пародонтита (пародонтоза) средней и средне-тяжелой степени.

### **Методика применения.**

**ТЕРАПИЯ:** после кюретажа и тщательной медикаментозной обработки заполняют костный карман материалом, после чего на несколько дней накладывают липкую или твердеющую повязку.

**ХИРУРГИЯ:** слизисто-надкостный лоскут и поверхность корня разобщают, после тщательного кюретажа и дезэпителизации лоскута костный карман заполняют остеопластическим материалом Колапол КП-2, ИНДОСТ 2 (пластины). Для лучшего контакта в карман дополнительно имплантируют ИНДОСТ-гель. После имплантации материала слизистую ушивают, в каждом межзубном промежутке на 6-7 дней. Следует следить за тем, чтобы швы не были напряжены избытком имплантационного материала. Больному назначают антигистаминные препараты, при необходимости - анальгетики и антибиотики.

*При заполнении различных костных полостей* после цистэктомии, секвестрэктомии и др. материалом заполняется костная полость, после чего костный дефект закрывается лоскутом. Допускается использование материала ИНДОСТ-гель с другими материалами: ГАП 99г, КОЛАПОЛ КП-2, мембраной ПАРОДОНКОЛ и др.

*Материал выпускается в стерильной упаковке. Повторно не стерилизовать.*

**Хранение.** Хранить при температуре до 25°C.

**Противопоказания.** Активный воспалительный процесс (во время операции).

**Срок годности:** 3 года

Не является лекарственным средством.

**Изготовитель:** ООО «НПК «ПОЛИСТОМ»  
105094, г.Москва, Семеновская наб., д.2/1, стр.1  
+7 499 922 35 36, [office@polystom.ru](mailto:office@polystom.ru)