



ИНСТРУКЦИЯ

по применению материала **ИНДОСТ пластины** при лечении *пародонтита* и других заболеваний в челюстно-лицевой области

Описание. Полоски размером 20x8x1,2±0,5 мм, массой 0,15± 0,05г, белого цвета.

Свойства. Является композицией органических и неорганических составляющих костных тканей. Характеризуется биосовместимостью с тканями человека и не вызывает реакции отторжения.

ИНДОСТ пластины усиливают остеогенез и стимулируют заживление раны в мягких и костных тканях.

Относится к малотоксичным веществам и не вызывает отдаленных нежелательных последствий (воспалительных, аллергических реакций, не обладает мутагенным и иммуномодулирующим действием, не влияет на течение беременности и развитие плода).

Показания к применению. Используется при терапевтическом и хирургическом лечении пародонтита и пародонтоза средней и средне-тяжелой степени с имплантацией **ИНДОСТ пластин** в костный карман, а также при различных заболеваниях в челюстно-лицевой области.

Методика применения. ТЕРАПИЯ: После кюретажа и тщательной медикаментозной обработки заполняют костный карман материалом, после чего на несколько дней накладывают **липкую или твердеющую повязку**. При необходимости ушивают слизистую в межзубном промежутке.

ХИРУРГИЯ: слизисто-надкостный лоскут и поверхность корня разобщают, после тщательного кюретажа и деэпителизации лоскута костный карман заполняется материалом **ИНДОСТ пластины**, фрагменты материала могут помещаться на вестибулярную поверхность. После имплантации материала слизистая ушивается в каждом межзубном промежутке на 6-8 дней. Следует следить за тем, чтобы швы не были напряжены избытком имплантационного материала. *Антибиотики, иммуномодуляторы и пр. лекарственные препараты могут применяться вместе с материалом путем пропитывания его до использования.*

Больному назначают антигистаминные препараты, при необходимости - анальгетики и антибиотики. Особое внимание уделяют гигиене полости рта. Хороший результат дает аппликация препаратов кератопластического действия (солкосерил, актовегил и др.).

Материал выпускается в стерильной упаковке. Повторно не стерилизовать.

Хранение. Хранить при температуре до 25°C (лучше в холодильнике).

Противопоказания. Активный воспалительный процесс (во время операции).

* Л – импрегнация линкомицина; М – импрегнация метронидазола.

Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше +25С (лучше в холодильнике)

Срок годности: 3 года

Не является лекарственным средством.

Изготовитель: ООО «НПК «ПОЛИСТОМ»

105094, г. Москва, Семеновская наб., д.2/1, стр.1

+7 499 922 35 36, office@polystom.ru