



ИНСТРУКЦИЯ

по применению материала **ПАРОДОНКОЛ пародонтологический**
при хирургическом лечении *пародонтита* и других
костнопластических операциях

Описание. Пластинки размером 30x25x0,2 мм или различные фигурные той же толщины, массой 0,20г. Содержит активную поверхность (белого цвета шероховатую на вид).

Фармакологические свойства. ПАРОДОНКОЛ усиливает остеогенез и стимулирует заживление раны в костных тканях и тканях пародонта. Полностью резорбируется.

Показания к применению. Используется при хирургическом лечении пародонтита (пародонтоза) средней и среднетяжелой степени, а также при различных костнопластических операциях в челюстно-лицевой области.

Методика применения. Характер разреза является определяющим для сохранения мягких тканей и обеспечения максимального кровоснабжения. Лоскут должен иметь широкое основание.

При проведении операции слизисто-надкостный лоскут и поверхность кости (корня) разобщают, чтобы подготовить место для имплантации. Имплантация материала предотвращает эпителиальную миграцию вглубь костной раны (пародонтального кармана) и способствует формированию кости (соединительнотканного прикрепления).

После тщательного кюретажа, дезэпителизации лоскута и терапии заполняют костную полость (костный карман) материалами Гидроксиапол ГАП-99г или Колапол КП-2. Материал ПАРОДОНКОЛ накладывается активной поверхностью на костную поверхность с закрытием корней зубов. В случае необходимости, из материала легко вырезаются фрагменты любой конфигурации. ПАРОДОНКОЛ любым (из доступных) способом фиксируют на костной ткани для предотвращения сползания.

Для придания эластичности материал смачивают (не более 1 минуты) кровью больного, физраствором, раствором антибиотика, фурацилина и пр.

После имплантации материала слизистая ушивается в каждом межзубном промежутке на 6-8 дней. Следует следить за тем, чтобы швы не были напряжены избытком имплантационного материала. Тщательное вырезание материала, позволяющее получить форму, предупреждающую возникновение излишнего напряжения лоскута и шва, ускоряет заживление мягких тканей.

Больному назначают антигистаминные препараты, при необходимости - анальгетики и антибиотики. *Антибиотики, иммуномодуляторы и пр. лекарственные препараты могут применяться вместе с ПАРОДОНКОЛОм путем пропитывания соответствующим раствором при его использовании.*

Особое внимание уделяют гигиене полости рта.

Материал выпускается в стерильной упаковке. Повторно не стерилизовать.

Противопоказания. Активный воспалительный процесс (во время операции).

Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше +25 С

Срок годности: 3 года

Не является лекарственным средством.

Изготовитель: ООО «НПК «ПОЛИСТОМ»
105094, г. Москва, Семеновская наб., д.2/1, стр.1
+7 499 922 35 36, office@polystom.ru