



## **ИНСТРУКЦИЯ**

по применению материала **ПАРОДОНКОЛ хирургический**  
при проведении различных костнопластических операций

**Описание.** Пластинки размером 40x20x1 мм, массой ~ 0,25 г, белого цвета. Имеет активную поверхность (с утолщением белого цвета). Возможно изготовления других типоразмеров.

**Фармакологические свойства.** ПАРОДОНКОЛ усиливает остеогенез и, полностью резорбируясь, стимулирует заживление раны в костных тканях.

**Показания к применению.** Используется при реконструктивных операциях в челюстно-лицевой области: закрытии расщелин верхнего неба, альвеолярного отростка, восстановления кортикальной пластины, коррекции альвеолярного отростка и пр.

**Методика применения.** Характер разреза является определяющим для сохранения мягких тканей и обеспечения максимального кровоснабжения. Лоскут должен иметь широкое основание.

При проведении операции слизисто-надкостный лоскут и поверхность кости разобщают, чтобы подготовить поверхность костной ткани.

После тщательного кюретажа, дезэпителизации лоскута и терапии заполняют костную полость материалом Гидроксиапол ГАП-99г или Колапол КП-2. При костнопластических операциях кость освежают бором или фрезой. Материал ПАРОДОНКОЛ накладывается активной частью на костную поверхность с перекрытием полупрозрачной мембраной костного дефекта на 2-4 мм. В случае необходимости, из материала легко вырезаются фрагменты любой конфигурации. ПАРОДОНКОЛ любым из доступных способов фиксируют на костной ткани для предотвращения сползания.

Для придания эластичности материал смачивают (не более 1 минуты) кровью больного, физраствором, раствором антибиотика, фурацилина и пр.

После имплантации материала слизистая ушивается немедленно. Следует иметь в виду, что в тканях материал слегка набухает, поэтому необходимо следить за тем, чтобы швы не были напряжены избытком имплантационного материала. В случае значительного отека на 2-3 день после операции через швы выпускают экссудат. Тщательное вырезание материала, позволяющее получить форму, предупреждающую возникновение излишнего напряжения лоскута и шва, ускоряет заживление мягких тканей.

Больному назначают антигистаминные препараты, при необходимости - анальгетики и антибиотики. *Антибиотики, иммуномодуляторы и пр. лекарственные препараты могут применяться вместе с ПАРОДОНКОЛом путем пропитывания соответствующим раствором при его использовании.*

Особое внимание уделяют гигиене полости рта.

*Материал выпускается в стерильной упаковке. Повторно не стерилизовать.*

**Противопоказания.** Активный воспалительный процесс (во время операции).

**Условия хранения:** в сухом месте, при температуре не выше +25С

**Срок годности:** 3 года

Не является лекарственным средством.

**Изготовитель:** ООО «НПК «ПОЛИСТОМ»  
105094, г.Москва, Семеновская наб., д.2/1, стр.1  
+7 499 922 35 36, [office@polystom.ru](mailto:office@polystom.ru)