

ИНСТРУКЦИЯ

по применению материала **ТКФ-95**г для замещения малых костных дефектов

<u>Описание.</u> Гранулы **ТКФ -95**г круглой или неправильной формы белого или почти белого цвета. Состав: β - трикальцийфосфат – 95%.

Материал выпускается в виде гранул размером 0,25-2 мм. Гранулы - пористые керамические фрагменты.

<u>Фармакологические свойства.</u> Является частью неорганического матрикса твердых тканей. Характеризуется хорошей биосовместимостью с тканями человека и не вызывает реакции отторжения. Отличается ускоренной по отношению к гидроксиапатиту биодеструктивностью, после заполнения костных полостей резорбируется, замещаясь костной тканью.

<u>Показания к применению.</u> Рекомендуется: для заполнения малых костных полостей различной этиологии после хирургического вмешательства по поводу: цистэктомии, резекции, удаления зубов для предотвращения атрофии альвеолярного отростка, и пр.

Методика применения. Материал ТКФ-95г в виде гранул увлажняют кровью пациента, можно тромбоцитарной массой (или стерильным физиологическим раствором) и хирургическим инструментом вносят в костный дефект, заполняя его на 80-90%. Вызвать свежее кровотечение можно с помощью бора при прохождении кортикальной части кости и обработки внутренней поверхности дефекта. Дефект закрывают мягкими тканями, накладывая швы, которые, по возможности, не должны располагаться в непосредственной близости с $\mathbf{T}\mathbf{K}\mathbf{\Phi}$.

Антибиотики, иммуномодуляторы и пр. лекарственные препараты могут применяться вместе с ТКФ путем его пропитывания до имплантации.

<u>Стерилизация препарата</u> Должна производиться перед применением и может производиться неограниченное число раз в сухожаровом шкафу при температуре t^O 180°C не менее 20 мин.

<u>Противопоказания</u> - гнойные воспалительные процессы в области заполняемого дефекта во время имплантации материала.

Упаковка: 1г (стерильно), 5г, 50г – не стерильно.

Условия хранения: Хранить при температуре от -30°C до +30°C

Срок годности: 3 года

Не является лекарственным средством.

<u>Изготовитель:</u> ООО «НПК «ПОЛИСТОМ» 105094, г.Москва, Семеновская наб., д.2/1, стр.1 +7 499 922 35 36, office@polystom.ru