



## ИНСТРУКЦИЯ: ТрАпекс-гель.

Паста для временного пломбирования корневых каналов.

**Назначение.** ТрАпекс-гель внутриканальный материал для консервативного лечения верхушечных периодонтитов с деструктивными процессами (кист, гранулем и т.п.) и зубов с несформировавшимися корнями. Препарат может использоваться в качестве временного материала для obturации корневых каналов на этапах эндодонтического лечения осложненного кариеса в терапевтической стоматологии и стоматологии детского возраста.

**Состав и основные свойства.** ТрАпекс-гель паста белого или желтоватого цвета, является композицией гидроксиапатита, трикальцийфосфата, оксида цинка с комбинацией противовоспалительных и антимикробных препаратов с органическими составляющими (Метронидазол, Л – линкомицин, дексаметазон).

При контакте с тканями эндодонта, особенно при выведении препарата за пределы апикального отверстия, при деструктивных процессах костной ткани, препарат способствует ликвидации воспалительного процесса и построению костной ткани в зоне повреждения. Использование геля на основе нанодисперсного Гидроксиапола (гидроксиапатит + трикальцийфосфат) служит профилактикой осложнений эндодонтического лечения.

Все компоненты препарата характеризуются биосовместимостью с тканями человека и не вызывают реакцию отторжения.

**Способ применения.** ТрАпекс-гель - лечебный материал для временного пломбирования корневых каналов. По завершению хемомеханического препарирования корневого канала (или на этапах многосеансного эндодонтического лечения), после тщательного промывания и удаления излишков влаги, паста может быть введена любым методом:

- Через стерильную иглу из шприца непосредственно в широкий канал;
- С помощью каналонаполнителя;
- Бумажным штифтом или любым эндодонтическим инструментом с «гладкой» рабочей частью.

Для более плотного контакта со стенками канала и возможного выведения препарата в заапикальное пространство, в просвет корневого канала временно может быть введен гуттаперчевый штифт размера и конусности соответствующей технике препарирования.

### **Длительность контакта**

1. При односеансном лечении осложненного кариеса паста может использоваться в виде однократной аппликации в полость зуба, после этого корневой канал тщательно просушивается и в него вносится постоянный пломбировочный материал;
2. Кратковременный контакт от 1 до 14 дней. ТрАпекс-гель может использоваться на этапах эндодонтического лечения с «холодным» течением процесса под временную пломбу (повязку) толщиной не менее 4 мм;
3. Длительный курс лечения от 14 до 180 дней – при значительном деструктивном процессе в костной ткани и незавершенного формирования корней. Для проверки реакции тканей зуба на хемомеханическое препарирование и контакта организма с препаратом, необходимо произвести временное пломбирование канала ТрАпекс-гелем под повязку на 1-14 дней. Затем произвести замену препарата под провизорную пломбу из СИЦ. Спустя 3 месяца провести рентгенологический контроль течения процесса. Пломбирование канала постоянным материалом произвести не позднее 6 месяцев наблюдения.

ТрАпекс-гель легко удаляется из канала традиционным методом, бумажным штифтом, с помощью эндодонтического шприца или ультразвуковой ирригации.

**Противопоказания.** ТрАпекс-гель не используется в фазах острого и обострения хронического воспалительного процесса эндодонта.

**Условия хранения.** при постоянной температуре (не выше +30<sup>0</sup>С)

**Срок годности:** указан на упаковке.

**Изготовитель:** ООО «НПК «ПОЛИСТОМ»

105094, г.Москва, Семеновская наб., д.2/1, стр.1

+7 499 922 35 36, [office@polystom.ru](mailto:office@polystom.ru)